

より安全に、よりスマートに進化しました

CBC

白血球 3 分類

CRP

血球計数 18 項目と CRP を同時測定

自動血球計数 CRP 測定装置 Yumizen H330 CRP

製造販売届出番号：26B3X00002230008

販売名：自動血球計数 CRP 測定装置 Yumizen H330 CRP

装置の詳細は
動画でご紹介しております▶



KEY WORD

Simple

簡単なワークフロー

Safety

使用者の安全に配慮した設計

Smart

洗練されたユーザビリティ

Stable

安定した測定結果を提供

2022/06/10 15:25		+CRP	標準
SID	012345		Q
WBC	7.6	$10^3/\mu\text{L}$	
RBC	4.46	$10^6/\mu\text{L}$	
Hgb	13.7	g/dL	
Hct	37.6	%	
PLT	284	$10^3/\mu\text{L}$	
CRP	1.9	mg/dL	H

過去結果比較

次測定		+CRP	標準
SID	70_MC4240004		

メニュー ヘルプ 終了洗浄

血球計数+CRP 測定結果画面

Safety

キャップピース機能搭載



測定者の安全に配慮
感染リスクの低減に貢献

Smart

バーコードリーダー内蔵化



片手で操作可能
配線少なく事故リスクを低減

Simple

CRP 試薬の保冷機能



測定ごとの試薬準備不要
必要な時にすぐに測定可能

Stable

タイマー機能で 自動起動/自動終了

曜日・時間 日付



起動・終了時の自動チェックで
装置の状態を良好に

Smart

GATELINK* 接続で さらに便利に



電子カルテ連携ソフトで
検査結果を自動で送信

Safety

測定モードを色で識別



高い視認性で誤操作低減
操作 1 つでモード切り替えも

*GATELINK はオプションです。

製品仕様

販売名	自動血球計数 CRP 測定装置 Yumizen H330 CRP
検体吸引量	CBC モード、QC CBC モード : 16 μ L (微量容器使用時: 10 μ L)
	+CRP モード、QC CBC モード : 28 μ L (微量容器使用時: 18 μ L)
測定項目	WBC、RBC、Hgb、Hct、MCV、MCH、MCHC、RDW、PLT、MPV、PCT、PDW、LYM%、MON%、GRA%、LYM#、MON#、GRA#、CRP
測定時間 (動作開始から 結果表示まで)	CBC モード、QC CBC モード : 約 80 秒 (採血管使用時)
	+CRP モード、QC CBC モード : 約 4 分 (採血管使用時)
使用環境条件	周囲温度: 18℃~ 30℃
	相対湿度: 25%~ 85% (結露しないこと)
メモリー	測定データ: 50000 件 (粒度分布付)
	QC データ: 最大 2160 件 (各レベル) (粒度分布付)

*Ethernet は富士フイルムビジネスソリューション株式会社の商標です。

表示範囲	WBC : 0.0 $\times 10^3$ 個/ μ L ~ 200.0 $\times 10^3$ 個/ μ L
	RBC : 0.00 $\times 10^6$ 個/ μ L ~ 10.00 $\times 10^6$ 個/ μ L
	Hgb : 0.0g / dL ~ 35.0g / dL
	Hct : 0.0% ~ 85.0%
	PLT : 0 $\times 10^3$ 個/ μ L ~ 2000 $\times 10^3$ 個/ μ L
	CRP (全血) : 0.0mg / dL ~ 23.0mg / dL [全血 Hct23.0% 以上]
	CRP (血清、血漿) : 0.0mg / dL ~ 17.0mg / dL
出力	内蔵感熱プリンター、USB メモリー、外部出力 (Ethernet*)
電源	AC 100V ~ 240V、50Hz / 60Hz
消費電力	85VA
寸法 (装置本体)	201(W)mm \times 440(D)mm \times 456(H)mm (突起部除く)
寸法 (試薬ボトルホルダー)	75(W)mm \times 200(D)mm \times 70(H)mm (突起部除く)
本体質量	17kg

株式会社堀場製作所

医用事業本部

TEL 075-313-5736 FAX 075-315-9525

<https://www.horiba.com/jpn/medical/>



●北海道 011-207-1800
●名古屋 052-433-3450

●東北[仙台] 022-776-8251
●大阪 06-6390-8011

●栃木 028-634-7051
●四国 087-867-4800

●東京 03-6206-4719
●広島 082-288-4433

●横浜 045-478-7017
●九州 092-292-3593

発行日: 2022年6月 MCJ-MED00124